



VORGETRÄNKTE TÜCHER
FÜR EMPFINDLICHE
OBERFLÄCHEN



Meliseptol® Wipes sensitive

Desinfektionstücher in der Spenderbox für empfindliche Flächen

Meliseptol® Wipes sensitive

EIGENSCHAFTEN

- Gebrauchsfertige Tücher zur Desinfektion von empfindlichen Oberflächen
- Weiche, nicht fuselnde Vliesqualität der Tücher schützt hochempfindliche Oberflächen sicher vor Verkratzungen
- Tränklösung Meliseptol® Foam pure greift selbst hochempfindliche Oberflächen nicht an
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Schnell wirksam, auch gegen Polyomaviren
- Aldehyd- und aminfrei
- Farbstofffrei und ohne Parfüm
- Tränkflüssigkeit DGHM²/VAH³-gelistet und in der IHO⁴-Viruzidie-Liste
- 90 Tage Anbruchstabilität der Tücher

HINWEISE ZUR ANWENDUNG

Flächen mit Meliseptol® Wipes sensitive wischen, so dass sie vollständig mit der Wirkstofflösung benetzt sind. Einwirkzeiten siehe Tabelle. Flächen dürfen nicht trocken gerieben werden.

Nicht auf heißen Flächen oder an unter Spannung stehenden elektrischen Geräten anwenden!

Auffüllen der Spenderbox: Folienbeutel aufschneiden und in die Spenderbox einsetzen. Erstes Tuch aus der Mitte der Tuchrolle herausziehen und in die Entnahmeöffnung des Deckels einfädeln. Deckel auf die Spenderbox aufschrauben.

Artikel	Art.-Nr.	Pharmacode
Spenderbox 60 Tücher à 15.2 x 20 cm	19582	4922073
Nachfüllpackung 60 Tücher à 15.2 x 20 cm	19530	5030017

Physikalisch-chemische Daten

Aussehen: weisse Tücher | Geruch: unauffällig | Dichte: ca. 0.98 g/ml
Flammpunkt: + 31 °C

Meliseptol® Wipes sensitive (Tränkflüssigkeit: Meliseptol® foam pure)

100 g Lösung enthalten: Propan-1-ol 17 g, Didecylidimethylammoniumchlorid 0.23 g, nicht-ionische Tenside
Angaben gemäss Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien: < 5% nicht-ionische Tenside

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

Meliseptol® Wipes sensitive eignet sich speziell für empfindliche Oberflächen wie z.B. SpaceStation, Perfusor® Space, Infusomat® Space, Blutzuckermessgeräte, OP-Leuchten, Lenovo® Notebooks sowie flexible Endoskope. Weitere Materialkompatibilitäten sind auf Anfrage erhältlich.

WIRKSPEKTRUM / EINWIRKZEITEN (EZ)

Einsatzgebiet	EZ
Flächendesinfektion gem. DGHM ² /VAH ³ bakterizid / levurozid	1 Min.*
4-Felder Test (bakterizid / levurozid)	2 Min.
Aviäre Influenzaviren	15 Sek.
Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) ¹	1 Min.
Rotaviren	1 Min.
TbB (M. terrae)	3 Min.
Polyomaviren SV40	5 Min.
Noroviren**	5 Min.

* Der kürzest mögliche Listungswert beim VAH beträgt 5 Min.

** Surrogatvirus MNV



VORGETRÄNKTE TÜCHER FÜR
EMPFINDLICHE OBERFLÄCHEN

Warnhinweise:

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

1) gem. RKI-Empfehlung, Bundesgesundheitsblatt 01-2004

2) DGHM = Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie

3) VAH = Verbund für Angewandte Hygiene

4) www.iho-viruzidie-liste.de

B. Braun Medical AG | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com