


Cleanic[®]

DIE EIN-SCHRITT-PROPHYPASTE



ALL IN ONE

Universal-Prophypaste garantiert hervorragende Resultate

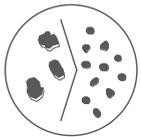

PATENTIERTE PERLIT-TECHNOLOGIE

Mit integrierter Abrasionsvariabilität.



WISSENSCHAFTLICH BEWIESEN

Maximale Reinigung und Politur mit geringer Abrasion von Schmelz und Dentin



ZEITERSPARNIS

Von der Reinigung zur Politur in einem Schritt



Cleanic ist Ein-Schritt-Prophy-Paste, die Ihrem Patienten hervorragende Reinigungs- und Politurresultate bei geringer Abrasion der Zähne in einem Schritt garantiert, und zwar aufgrund der klinisch bewährten integrierten Abrasionsvariabilität von natürlichen Perlit-Partikeln.



WO TRADITIONELLE PROPHY PASTEN VERSAGEN ...

Traditionelle Pasten, normalerweise auf Bimssteinbasis, sind aggressiv gegenüber Schmelz, Dentin und Füllungen; dies verursacht:



Sie erfordern außerdem den doppelten Aufwand, da mindestens zwei Pasten mit unterschiedlicher Körnung für effektives Arbeiten benötigt werden. Dies führt häufig dazu, dass die Politur bei der Behandlung weggelassen wird, um Zeit zu sparen, wobei die verbleibende unpolierte Oberfläche mit der Zeit verfärbt wird und sich dort neue Plaque ansammelt.

WAS IST ANDERS MIT CLEANIC?

Cleanic ist eine einzigartige Ein-Schritt-Prophylaxepaste für Reinigung und Politur, die auf der Perlit-Technologie basiert.

Dies bedeutet schonende, aber effiziente Reinigung und Politur, alles in einer Sitzung und mit nur einer Paste.



Cleanic available in 5 tastes

-  Berry Burst
-  Mint
-  Green Apple
-  Light
-  Mint Fluoride Free

INTEGRIERTE ABRASIVSVARIABILITÄT


Die vulkanischen Perlit-Partikel (natürliches Siliziumoxid) passen ihre Abrasivität im Laufe Ihrer Behandlung an.

REINIGUNG

Beim ersten Auftragen von Cleanic auf den Zahn verhält es sich wie eine grobe Paste. Dabei hat Cleanic seine volle Reinigungskraft.


POLIEREN

Unter Belastung und innerhalb von Sekunden werden die abrasiven Partikel zerlegt und ihre schneidenden Kanten abgerundet und stumpfer. Jetzt setzt die Wirkung der Paste für die Hochglanzpolitur ein.

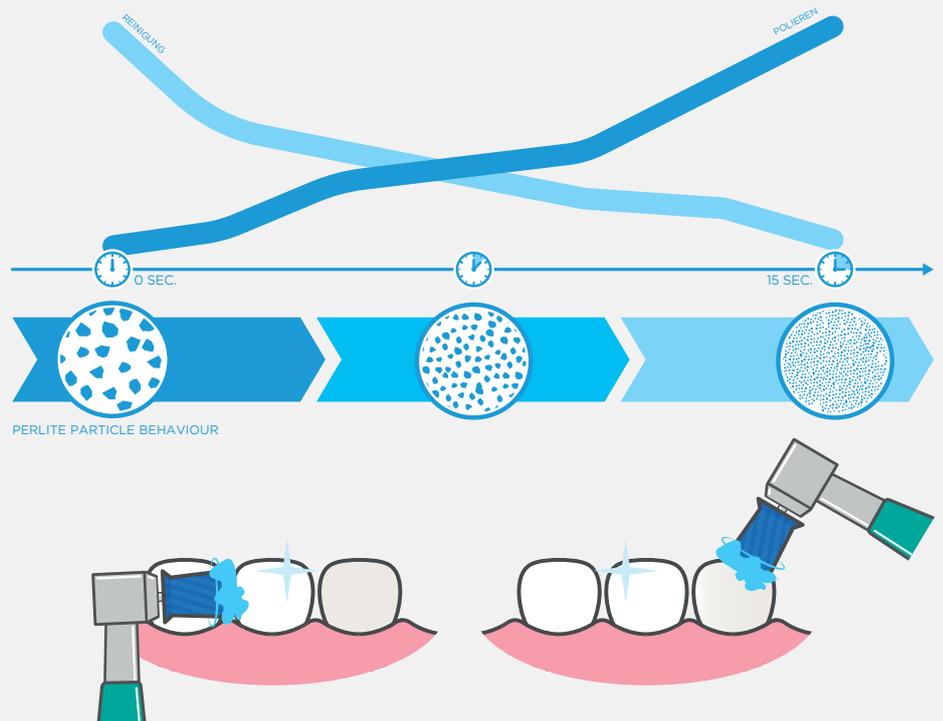

DIE VERWENDUNG VON CLEANIC

Tragen Sie die Cleanic-Paste nur auf eine begrenzte Anzahl von Zähnen (etwa 3 Zähne) mit einem Gummikelch auf (z. B. Pro-Cups), um in nur einem Schritt von der Reinigung zur Politur zu arbeiten. Anschließend applizieren Sie eine frische Portion Cleanic-Paste, um die nächste Gruppe von Zähnen zu behandeln.

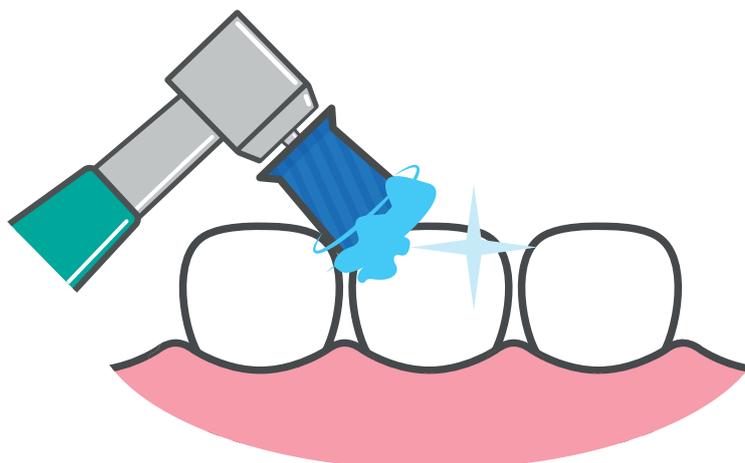

FÜR NORMALE BEZAHNUNG:

Arbeiten Sie von der inzisalen/okklusalen Oberfläche jedes Zahnes zur Gingivaregion; dies minimiert die Abrasion am Zahn.

FÜR FREILIEGENDE DENTIN- ODER WURZELOBERFLÄCHEN:

Beginnen Sie durch Applikation einer frischen Portion Paste auf die Schmelzoberfläche. Arbeiten Sie mit der gebrauchten Paste in Richtung freiliegende Wurzel- oder Dentinoberflächen (so ist sie weniger aggressiv).

BESTELLEN SIE IHR CLEANIC JETZT!

Art.-Nr.	Beschreibung	Content	Fluoride	RDA	REA	Taste	Menthol	Paste Colour
3110	Cleanic Cartridge Refill Packs	200g	0.15% CaF	27	3.4	Mint	Y	Light blue
3130	Cleanic Cartridge Refill Packs	100g	0.15% CaF	27	3.4	Mint	Y	Light blue
3210	Cleanic Cartridge Refill Packs - fluoridfrei	200g	-	27	3.4	Mint	Y	Light blue
3230	Cleanic Cartridge Refill Packs - fluoridfrei	100g	-	27	3.4	Mint	Y	Light blue
3140	Cleanic Single Dose	200x 2g	0.10% NaF	27	3.4	Mint	Y	Dark blue
3180	Cleanic in der Tube Mint	100g	0.10% NaF	27	3.4	Mint	Y	Blue
3182	Cleanic in der Tube Green Apple	100g	0.10% NaF	27	3.4	Green Apple	N	Green
3183	Cleanic in der Tube Mint fluoridfrei	100g	-	27	3.4	Mint	Y	Light blue
3184	Cleanic in der Tube Light	100g	0.10% NaF	27	3.4	--	N	Light grey
3186	Cleanic in der Tube Berry Burst	100g	0.10% NaF	27	3.4	Red fruits	N	Pink
3190	Cleanic Collection Kit	3x 100g Tube Cleanic Prophy Paste (Mint with Fluoride, Green Apple, Light), Tube Squeezer, Reusable Bag.						

TESTEN SIE CLEANIC MIT SEINEN IDEALEN PARTNERN!

Pro-Cup und Pro-Cup Junior

Das laminierte Profil dieser Einweg-Kelche hilft, die Bildung von Spritzkugeln bei der Applikation der Prophy-Paste zu vermeiden. Das gleiche Profil trägt auch dazu bei, eine Überhitzung zu begrenzen. Pro-Cup und Pro-Cup Junior enthalten kein Naturlatex.

	CODES & QUANTITIES				COLOUR	BESCHREIBUNG	TYPE		SINGLE USE 	
	Art.-Nr.	QTY	ART.-NR.	QTY			LATCH	SCREW		
   	Pro-Cup	990/30	30	990/120	120	●	Pro-Cup - Soft	✓	✓	✓
		991/30	30	991/120	120	●	Pro-Cup - Hard	✓		✓
		1810/30	30	1810/120	120	●	Pro-Cup - Soft		✓	✓
		1811/30	30	1811/120	120	●	Pro-Cup - Hard		✓	✓
   	Pro-Cup Junior	992/30	30	992/120	120	●	Pro-Cup Junior - Soft	✓		✓
		993/30	30	993/120	120	●	Pro-Cup Junior - Hard	✓		✓
		1812/30	30	1812/120	120	●	Pro-Cup Junior - Soft		✓	✓
		1813/30	30			●	Pro-Cup Junior - Hard		✓	✓



Pastenträger von Kerr

Diese für ein- oder mehrmaligen Gebrauch erhältlichen ergonomischen Prophypasten-Träger lassen sich einfach an Ihren Finger anpassen und haben genügend Platz/Volumen auch für größere Mengen von Paste (wenn/falls notwendig).

Ring Pots - Not autoclavable

Art.-Nr.	Beschreibung
985	Ring Pots – Blue – Pack of 100
986	Ring Pots – Assorted Colours – Pack of 100

Prophy Clips - Autoclavable

Art.-Nr.	Beschreibung
3151	Prophy Clips – Pack of 6