

Verwandte Produkte

ALLOY PRIMER

Verbessert den Verbund zwischen Dentalmetallen und Kunststoffen, z.B.:

- beim Zementieren von Metall-Inlays/Onlays oder Kronen
- bei der Reparatur von Kunststoff an Teilen von Prothesengerüsten

K-ETCHANT GEL

Enthält 40 % Phosphorsäure, geeignet zur Verwendung bei unbeschleunigtem Schmelz, bei Keramik und ausgehärtetem Komposit



CLEARFIL LINER BOND 2 PROTECT LINER-F

Ist ein lighthärtender Kunststoff mit niedriger Viskosität. Er wird eingesetzt zur Desensibilisierung von freiliegenden Zahnhälsen und Wurzeloberflächen. Zeichnet sich aus durch exzellente Widerstandsfähigkeit gegen Abrasion sowie durch optimale Fluoridabgabe. Dadurch kann der Sekundärkariesbefall entscheidend verringert werden. (Abbildung 7)



Abbildung 7

Geben Sie einen dünnen Film PROTECT LINER F auf die lichtgehärtete Bond-A-Flüssigkeit und lighthärten Sie für 20 Sekunden.



CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR

Enthält einen Silanhaftvermittler. In Verbindung mit LINER BOND 2V erzielt man hiermit eine optimale Haftung an Keramik. Es wird z.B. benutzt für intraorale Reparatur von frakturierten Keramikronen mit Kompositen. (Abbildung 8 und 9)

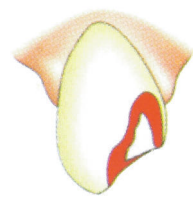


Abbildung 8

Auftragen von K-ETCHANT GEL, 5 Sekunden einwirken lassen. Ausspülen und trocken blasen.

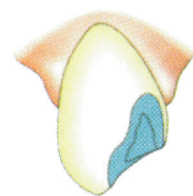


Abbildung 9

Mischen der Primerflüssigkeiten A und B und CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR zu gleichen Teilen. Auftragen der Mischung, 5 Sekunden einwirken lassen. Vorsichtig abbläsen. Nicht ausspülen.



PROFESSIONELL - OPTIMALE HAFTUNG



Universell einsetzbares Bonding für alle licht- und chemisch härtenden Komposite. Mit selbstätzendem Primer.

CLEARFIL™ LINER BOND 2V

Optimierte Haftung an Zahnschmelz, Dentin, ausgehärtetem Komposit, allen Legierungen und Metallen, Amalgam und Keramik.

Zur Anwendung bei Kompositfüllungen, bei Komposit- und Keramikrestorationen.

Zur Behandlung von sensiblen Zahnhälsen sowie präparierten Kronenstümpfen.

Für die intraorale Reparatur von Keramikronen und Facetten.



Manufactured by Kuraray Co., LTD. 1-12-39, Umeda, Kita-ku, Osaka 530-8611, Japan
 Kuraray European Union Representative Kuraray Europe GmbH, Schiess Strasse 68, D-40549 Düsseldorf, eMail: dental@kuraray.de
 Vertriebspartner Deutschland und Österreich: Hager & Werken GmbH + Co.KG, Tel. 0203-99269-0, e-Mail: info@hagerwerken.de
 Vertriebspartner Schweiz: Globopharm AG., Tel. 0198 621 01, Fax 0198 432 74, e-Mail: dental@globopharm.com

ACHTUNG: Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung von LINER BOND 2V sorgfältig durch. Sie das Produkt verwenden. LINER BOND 2V ist ein eingetragenes Warenzeichen der Kuraray Co., Ltd. GEMÄHRELESTUNG: Sämtliche Angaben basieren auf Messungen die durch die Kuraray Co., Ltd. durchgeführt wurden. Alle enthaltenen Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Eine Gewährleistung wird nicht übernommen. Kuraray Co. ist nicht für nachweislich fehlerhafte Produkte, welche die Kuraray Co. Ltd. nach der Zuständigkeitsgrenze hergestellt wurden, verantwortlich. Wende die Kuraray Co. Ltd. nach der Zuständigkeitsgrenze hergestellt wurden, übernehmen wir keine Haftung für den Schaden, der durch die Anwendung unserer Produkte verursacht wird. Die Anwendung unserer Produkte ist eine Ergänzung für den gesamten Einsatzzweck zu überprüfen und trägt alle hiermit verbundenen Risiken und Haftung. 06-EIL-D-12-99

LINER BOND 2V


Mit dem einzigartigen MDP-Monomer

CLEARFIL LINER BOND 2V ist der Nachfolger von CLEARFIL LINER BOND 2, enthält einen selbsttätigen Primer sowie den neuen haftenden Monomer MDP. Das bedeutet:

- einfache Anwendung sowie enorme Zeitersparnis: keine separate Anwendung von Ätzflüssigkeit, somit entfallen Abspülen und Trocknen der Kavität (s. Abb. 1)
- Pulpenfreundlichkeit: Nach der Applikation wird der pH-Wert des Primers durch die Pufferwirkung der Kalziumionen aus der Zahnhartsubstanz neutralisiert.

Größere Haftfähigkeit von MDP

- an Zahnschmelz
- an Dentin
- an Metallen
- an Keramik und ausgehärtetem Komposit (bei gleichzeitiger Anwendung von CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR) (s. Abb. 2)

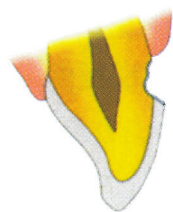

Mischen von Primer Flüssigkeit A und B. Mischung auftragen. 30 Sekunden einwirken lassen. Kurz mit Luftstrom trocknen. Nicht ausspülen!



Abbildung 1

Der Primer dringt nur bis zu 1 µ tief ein!!

Der Primer dringt nur bis zu einer Tiefe von 1 µ ein!

Dies hat die folgenden Vorteile:

- optimaler Schutz der Pulpa
- optimale Haftung
Während des zweiten Schrittes (Auftragen der Bondingflüssigkeit) wird diese dünne, vorbehandelte Schicht mit der Bondingflüssigkeit gefüllt, so daß eine optimale Haftung erzielt werden kann. Tatsächlich können eine übermäßige Ätztiefe und Dekalzifikation sehr schlechte Haftergebnisse verursachen: die Bondingflüssigkeit dringt nicht tief genug in die geätzte Schicht ein, was eine nicht ausreichend gefüllte Kollagen- und Dentinschicht im dekalzifizierten Bereich zur Folge hat. Das Ergebnis sind schlechte Haftwerte.

Naß- oder Trockenanwendung - kein Problem mehr!

Der neue CLEARFIL LINER BOND 2V Primer enthält Wasser, so daß kein „absolut feuchtes“ oder „absolut trockenes“ Arbeitsgebiet vorliegen muß. Anders als bei feuchten Haftsyste men auf Azetonbasis kann sich der Zahnarzt hier völlig auf seine Restaurationsarbeit konzentrieren. Überflüssige Überlegungen in Bezug auf die absolute Feuchtigkeit oder absolute Trockenheit des Arbeitsgebietes entfallen.

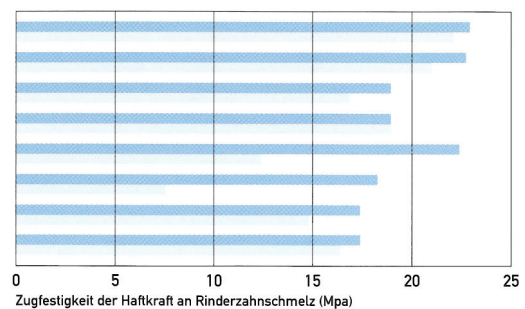
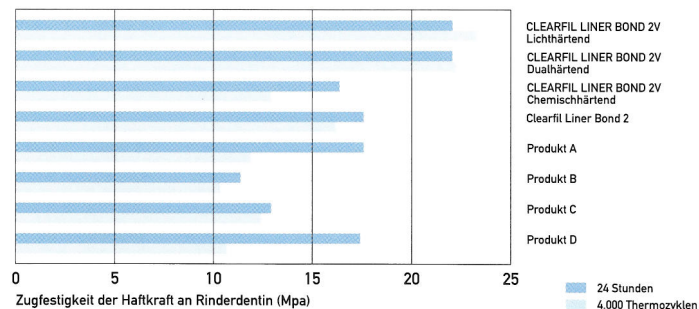


Abbildung 2

Kein Kollabieren des Kollagens

Während des üblichen Ätzvorganges kollabiert das freigelegte Kollagenetzwerk. Dies ist eines der Hauptprobleme bei konventionellen Bondingsystemen, da es zu einer geringeren Bondingstärke führt. Im Gegensatz dazu ist CLEARFIL LINER BOND 2V, im Hinblick auf das Zahngewebe, biokompatibel. Durch den schonenden Ätz- und Dekalzifikationseffekt des Primers sowie durch dessen Wassergehalt verbleibt das Kollagenfasernetzwerk in seiner natürlichen Form sowie in seinem natürlichen Volumen.

Diese Eigenschaften von CLEARFIL LINER BOND 2V garantieren eine erfolgreiche Haftung sowohl des Zahnes als auch der Restauration.

Dualhärtung und Mehrzweckanwendung

CLEARFIL LINER BOND 2V ermöglicht dem Zahnarzt die Verarbeitung von allen licht- und chemischhärtenden Kompositen sowie Amalgam. Es kann demnach wirklich als „Universalbonding“ bezeichnet werden.



Lichthärten

Bond applizieren, dann leicht verblasen. So erhalten Sie eine einheitlich dicke Bondingschicht. Eine optimale Haftung wird erreicht wenn Sie 20 Sekunden lichthärten. Komposit applizieren, lichthärten und polieren. (s. Abb. 3 und 4)

Chemischhärten


Bondings A und B mischen, die Mischung applizieren und vorsichtig durch Verblasen gleichmäßig in der Kavität verteilen. Die Bondingflüssigkeit nicht lichthärten. Chemisch härtenden Komposit und Amalgam wie gewohnt auf die ungehärtete Flüssigkeit applizieren. (s. Abb. 5 und 6)



Bond A Flüssigkeit applizieren. Leicht abblasen. Für 20 Sekunden lichthärten.




Abbildung 3

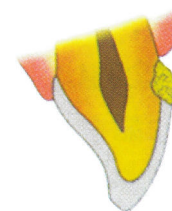

Komposit auftragen, lichthärten, finieren und polieren




Abbildung 4

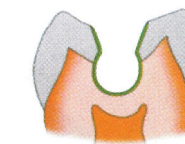

Mischen von Bondflüssigkeit A und B, Mischung auftragen, leicht verblasen.



Abbildung 5

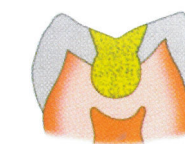

Wie gewohnt chemisch härtenden Komposit oder Amalgam plazieren, finieren und polieren.

Abbildung 6