

HERO Shaper®

Protocole Opérateur
Operating Protocol
Operatives Protokoll

Séquence endodontique pour traitement et finition / Endodontic sequence for treatment and finishing / Endodontische Sequenz für Erstbehandlung und abschließende Wurzelkanalausarbeitung

Séquence jaune cas complexes / Yellow sequence complex cases / Gelbe Sequenz komplexe Fälle

1 N°20 6%



2 N°20 4%



3 N°25 4%



4 N°30 4%



Vitesse : 300 à 600 tr/min / Rotation speed: 300 to 600rpm / Motorgeschwindigkeit: 300-600 U/min

À titre indicatif uniquement / For indication only /
Gilt nur für Anzeige

 MICRO-MEGA®

5-12, rue du Tunnel - 25006 Besançon Cedex - France
Tél. : +33 (0)3 81 54 42 42 - Fax : +33 (0)3 81 54 42 39
mmb@micro-mega.com - www.micro-mega.com



5 10 15 20 25 30 mm



HERO Shaper®




Séquence rouge cas intermédiaires / Red sequence
intermediate cases / Rote Sequenz mittlere Fälle

Séquence bleue cas simples / Blue sequence
easy cases / Blaue Sequenz einfache Fälle

1 N°25 6% 2 N°25 4% 3 N°30 4%

1 N°30 6% 2 N°30 4%

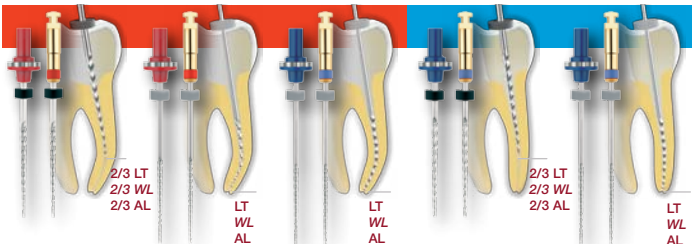

Vitesse : 300 à 600 tr/min / Rotation speed: 300 to 600rpm / Motorgeschwindigkeit: 300-600 U/min

Nombre d'utilisation maximal indiqué
sur l'étiquetage du dispositif /
Maximum number of uses indicated
on the product labeling /
Angaben zur maximalen Anzahl
der Anwendungen auf dem Produktetikett

135°C



Dispositifs non stériles
Non-sterile devices
Nicht sterile Produkte

Dispositifs stériles
Sterile devices
Sterile Produkte

STERILE EO

Stérilité garantie si emballage
non ouvert non endommagé
Sterility guaranteed if package
is unopened and undamaged
Sterilität bei ungeöffneter und
unbeschädigter Verpackung garantiert

