

NEU

Sicher und
souverän
durch den
Kanal

wave • one[®]
GOLD

Reziprok arbeitendes Ein-Feilen-System



+
WE
KNOW
ENDO.

Jetzt noch besser dank **GOLD** Technologie:

- Widerstandsfähiger gegen zyklische Ermüdung
- Schneidleistung auf einem neuen Level
- Bewährte WAVEONE[®] Einfachheit


DENTSPLY
MAILLEFER

Die Einfachheit von WAVEONE[®] mit goldenen Vorteilen

Seit der Einführung von WAVEONE[®] in 2011 verwenden immer mehr Zahnärzte die reziproke Technologie und sind begeistert von der Einfachheit mit der WAVEONE[®] hochwertige endodontische Behandlungen ermöglicht.


- Nur 1 Feile in den meisten Fällen
- Berücksichtigt die Wurzelkanalanatomie
- Reziproke Technik mit guter Instrumentenkontrolle

Gleitpfad-Management
pro • glider[®]

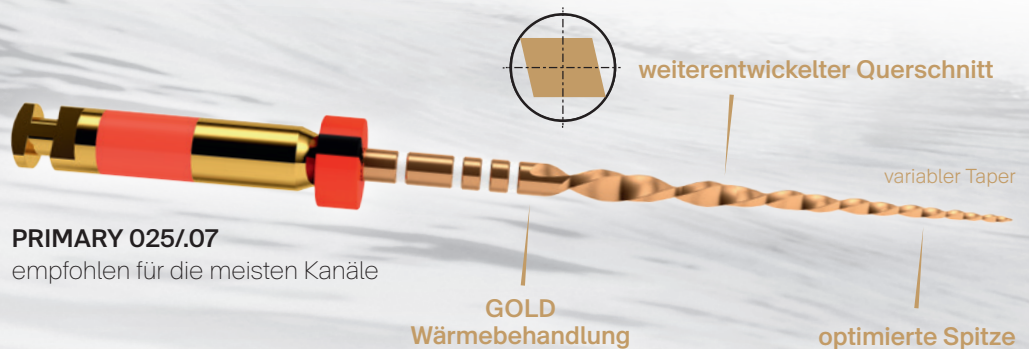


1 Erhöhte Patientensicherheit

- WAVEONE[®] GOLD Primary ist um 50% widerstandsfähiger gegen zyklische Ermüdung als WAVEONE[®] Primary
- Reduzierte Gefahr des Einschraubens im Vergleich zu konventionell rotierenden Feilen

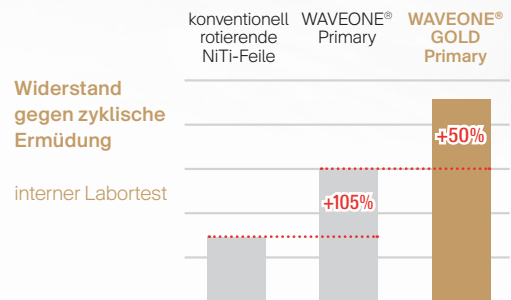


2 Größere Bandbreite an Kanalmorphologien

- Die GOLD-Technologie macht die Feilen noch flexibler
- Erweitertes Feilensortiment (Small, Primary, Medium, Large)

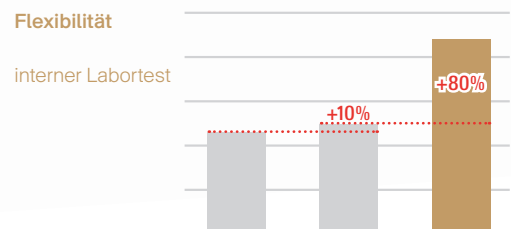

3 Noch kürzere Aufbereitungszeit

- Schneidleistung auf einem neuen Level
- Die Ein-Feilen-Technik spart Zeit beim Aufbereiten und Spülen der Wurzelkanäle

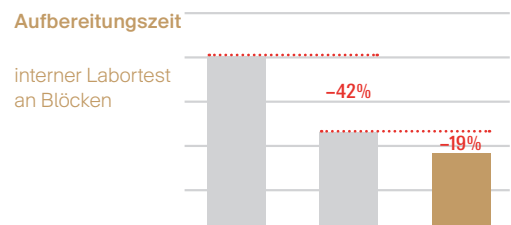

WAVEONE® GOLD – das reziproke Ein-Feilen-System

Reziproke Rotation bedeutet, dass die Feile während der Aufbereitung kontinuierlich ihre Drehrichtung ändert. Dies verringert die Gefahr des Einschraubens und Feilenbruchs.

Funktionsweise

Ein großer Rotationswinkel in Schneidrichtung sorgt für hohe Effizienz. Ein kleiner Winkel in Gegenrichtung lässt die Feile unter Beibehaltung der Wurzelkanalanatomie sukzessiv tiefer in den Kanal eindringen.



SMALL 020/07



MEDIUM 035/06



LARGE 045/05

Das sagt unser **Entwickler-Team**

Dr. C. Ruddle, Dr. J. Webber, Dr. W. Pertot, Dr. S. Kuttler

WAVEONE® GOLD bietet Ihnen eine metallurgisch verbesserte Ein-Feilen-Technik zur Kanalaufbereitung. Optimiert wurden auch Spitzendurchmesser, Taper und Querschnitt, so dass die Feile noch sicherer, effizienter und flexibler arbeitet. WAVEONE® GOLD macht Wurzelkanalaufbereitung für Sie einfacher und erfolgreicher als je zuvor.



Präoperativ



Postoperativ



Postoperativ

Mit freundlicher Genehmigung
von Dr. J. Webber

Die Komplettlösung



REZIPROK ROTIERENDE NiTi FEILE

WAVEONE® GOLD

A0756	Small	020/.07
	Primary	025/.07
	Medium	035/.06
	Large	045/.05

Erhältlich in 21 / 25 / 31 mm;
Blister à 6 Feilen, steril

A0754	Sortiment	
	(Small, Primary, Medium, Large)	
	Erhältlich in 21 / 25 / 31 mm; Blister à 4 Feilen, steril	



MOTOREN

A1054	X-SMART iQ™ Motor
A1032	X-SMART® PLUS Motor



OFEN

A0176	THERMAPREP® 2
	EU (230V)



APEX LOCATOR

A1030	PROPEX PIXI™
-------	---------------------

PAPIERSPITZEN



A175W	WAVEONE® GOLD Papierspitzen	
	Small	180 x
	Primary	180 x
	Medium	180 x
	Large	180 x

GUTTAPERCHA STIFTE (variabler Taper)



A175X	WAVEONE® GOLD GP Stifte	
	Small	60 x
	Primary	60 x
	Medium	60 x
	Large	60 x



A10541	X-SMART iQ™ Starter Kit
	1 Motor mit Winkelstück
	15 Feilen WAVEONE® GOLD Primary
	4 Sortimentsblister à 4 Feilen WAVEONE® GOLD
	3 Feilen PROGLIDER®
	1 iPad Schutzhülle

A10358	X-SMART® PLUS Starter Kit
	1 Motor mit Winkelstück
	15 Feilen WAVEONE® GOLD Primary
	4 Sortimentsblister à 4 Feilen WAVEONE® GOLD
	3 Feilen PROGLIDER®

KITS

THERMAFIL®



A1750	THERMAFIL® Blister für WAVEONE® GOLD
	Erhältlich in Small, Primary, Medium, Large; Blister à 6 Obturatoren oder Packung mit 5 Blistern à 6 Obturatoren

SEALER



606.20.118	AH Plus Jet® Nachfüllpackung
	2 x Spritzen à 15 g
606.20.116	AH Plus Jet® Mischkanülen/ Intraoral-Tips Nachfüllpackung
	40 x Mischkanülen/Intraoral-Tips

WURZELKANALEINLAGE



606.20.123	AH Temp™ Standardpackung
	4 x Spritzen à 0,75 ml 20 x Kanülen
606.20.124	AH Temp™ Kanülen Nachfüllpackung
	20 x Kanülen
A88013S1	Disposa-Shield®
	500 x Disposa-Shield® Schutzhüllen

RESTAURATIVE



606.03.020	SDR® Intro Kit
	45 x Compulas à 0,25 g (Universal Shade)
	1 x illustrierte Gebrauchsanleitung
	1 x Xeno® Select à 2,5 ml
	1 x Applikatorpistole
	1 x SDR® Aufbewahrungsbox